


# C-アームカバー ポケット型

## 88-457

一件の手術はこの一枚のドレープで何回でも清潔に撮影できます。  
C-アームを手術台の下に回す際、清潔・不潔の境界線を明確にするためオイフを何枚も使用するのとは不要になります。



両面テープで患者ドレープ（手術台）に固定する。

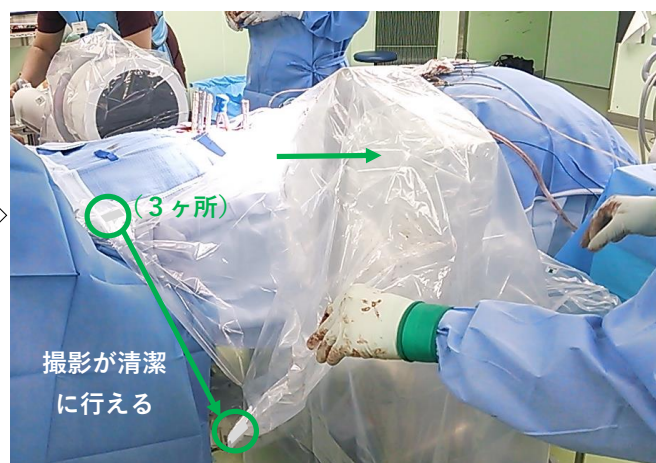


ポケット部分をマジックテープから離す。  
C-アームを回転して、発生装置が手術台の下からポケットに入る。



清潔領域が維持され、安心してかつ効率よく手術が進む。



撮影を終えたら、C-アームを元の位置に戻し、  
ポケットを再びマジックテープで手術台側に固定する。  
一件の手術中、清潔な撮影は何回でも可能になる。

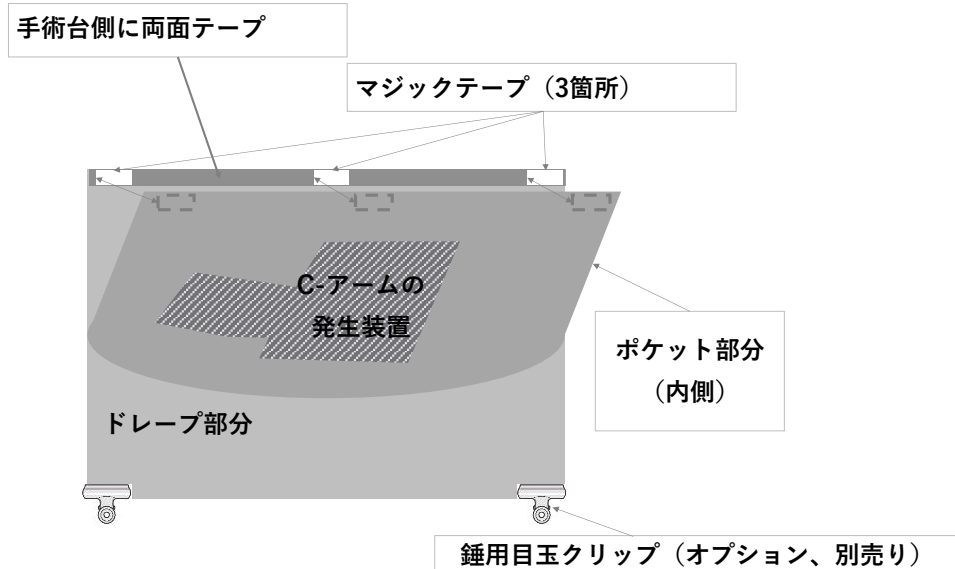

- ★ C-アームの発生装置が手術台の下からポケットに入り、手術側は清潔の状態を安易に維持できます。
- ★ ドレープ幅が137cmのため、ドレープ位置を変えずに、頸椎や腰椎にも対応できます。

**製品名：** C-ARM COVER Pocket Style 137/120 (C-アームカバー ポケット型)  
**製品番号：** 88-457  
**規格：** 幅137cm x 高さ120cm (ポケット部分137 x 50cm)  
**滅菌：** EOガス滅菌      **包装：** 二重包装      **材質：** 透明かつ強度に優れたポリエチレンシート  
**用途・使用場所：** C-アームを手術台の下から回す時の滅菌カバー；清潔区域を維持するための滅菌カバー  
**単価：** ¥3,200/枚 (税抜)  
**梱包・販売単位：** 16枚/小箱 (¥51,200)    48枚/梱 (¥153,600)  
**錘用目玉クリップ (オプション、別売り) (規格：65mm)**  
     TC65STL2 (スチール製)    2個1組    ¥200/組    (税抜、送料別)  
     TC65SUS2 (ステンレス) 2個1組    ¥700/組    (税抜、送料別)

当該製品はFDA認可工場で厳密な品質管理基準に基づき製造されており、  
 CEマーク、ISO9002及びEN46002も受けています。

**製造元：** PharmaSept, Ltd. (Israel)  
**輸入元：** シカゴ東京メディカル株式会社  
                  千391-0216 長野県茅野市米沢4175-1  
                  【受注センター】  
                  電話番号    03-6284-0800  
                  FAX番号     03-6284-0802



代理店: